




คู่มือประกอบการใช้งาน / วิธีการใช้งาน ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ

กรุณาศึกษารายละเอียดในคู่มือและข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยละเอียดก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผูู้ใช้งาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	Hyper Foam 1 Hyper Foam 1 Clinic	Hyper Foam Plus Hyper Foam Plus Clinic Hyper Foam Visco Clinic*	Hyper Foam 2 Hyper Foam 2 Clinic	Maxx250 Maxx250 Clinic
สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง	ที่นอนโฟมและฟ้าคลุม PU-TEX ที่มีซิปพร้อมคู่มือการใช้งาน			
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน	เพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงหรือเพื่อนอนพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยทั่วไป			
	ป้องกันแผลกดทับเท่านั้น	บรรเทาอาการแผลกดทับได้ ถึงระดับที่3 (EPUAP) ความเสี่ยงปานกลาง *ได้ถึงระดับที่2 (EPUAP)	บรรเทาอาการแผลกดทับได้ ถึงระดับที่4 (EPUAP) ความเสี่ยงสูง	บรรเทาอาการแผลกดทับได้ ถึงระดับที่4 (EPUAP) ความเสี่ยงสูง
ข้อห้ามใช้	ไม่มี			
ข้อบ่งใช้	ใช้สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่มิมีนหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย			
น้ำหนักผู้ใช้งานที่สามารถรองรับได้	ไม่เกิน 90 กิโลกรัม	20 - 140 กิโลกรัม	20 - 150 กิโลกรัม	40 - 250 กิโลกรัม
วัสดุ	โฟมชนิด PUR ฟ้าคลุม PU-coating	โฟมชนิด PUR ฟ้าคลุม PU-coating	โฟมชนิด PUR ฟ้าคลุม PU-coating	โฟมชนิด PUR ฟ้าคลุม PU-coating
ขนาด	กว้าง: 90 - 100 เซนติเมตร ยาว: 190 - 220 เซนติเมตร			
น้ำหนัก (90/200 ซม.)	9 กิโลกรัม	11 กิโลกรัม	12 กิโลกรัม	18 กิโลกรัม
เครื่องมือแพทย์ Class 1 อ้างอิงถึง 93/24 EWG และ กฎหมายเครื่องมือแพทย์ (MPG)				
ความปลอดภัยทางเทคนิค/ การป้องกันการลมนไฟ	DIN EN 597 I + II // BS 7175 sec 3 crib 5			
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ	DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1			
หมายเหตุด้านความปลอดภัย	ใช้งานกับเตียงที่สามารถปรับระดับระนาบเตียงได้โดยระวางกั้นข้างเตียงต้องมีความสูงอย่างน้อย 22 เซนติเมตร เหนือฟ้าสปริงด้านบนของที่นอนโฟม			
การรับประกัน	3 ปี	3 ปี	5 ปี	5 ปี

การทำความสะอาด/ บำรุงรักษา/ อื่นๆ

สำหรับการใช้งานที่บ้าน	สำหรับการใช้งานที่คลินิก/โรงพยาบาล
ขณะมีผูู้ใช้งาน	
เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
	
เมื่อมีการเปลี่ยนผูู้ใช้งาน	
เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	ฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ Autoclave
	

วิธีการใช้งาน

- หลังจากได้รับสินค้าแล้วให้นำสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ทันที
- นำฟ้าคลุมที่นอนวางลงบนเตียง
- หันด้านที่ระบุไว้ว่า "This Way Up" ขึ้นด้านบน โดยให้ตัวอักษรชี้ขึ้น

ผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐาน MPG (German Medical Device Act)

Funke Medical AG
Ahrenfeld 10
46348 Raesfeld
Germany

โทร : (+49) 2865/266 93 50
แฟกซ์ : (+49) 2865/8133
อีเมล : info@funke-medical.de
เว็บไซต์ : www.funke-medical.de

RKI = Robert-Koch-Institute (RKI) เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเยอรมนี ที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและควบคุมโรค
DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (German Society for Hygiene and Microbiology)
MPG = Medizinproduktegesetz (Medical Devices Act)

วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น

คำเตือน : ศึกษาคู่มือและข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยละเอียดก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผูู้ใช้งาน

ข้อควรระวัง : ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟ้าคลุมที่นอนได้ถูกติดตั้งโดยหันด้านและทิศทางถูกต้องทุกครั้งก่อนการใช้งาน

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท สมาร์ทโฮส จำกัด 7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร : 02-018-2100

อีเมล : mys@samh.co.th

เว็บไซต์ : www.samh.co.th