

APEX

คู่มือการใช้งาน ที่นอนลม เอเพ็กซ์ รุ่น โดมุส 1 (APEX Model Domus 1)

APEX

บริษัท เอเพ็กซ์เมคคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
65/100 อาคารชานาณเพ็ญชาติบิซเนสเซ็นเตอร์ ชั้น11
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-018-2140
www.amt.in.th



เพื่อความปลอดภัย ควรศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติ

1. ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ
2. ลดแรงเสียดสีระหว่างที่นอนและผิวของผู้ป่วย ช่วยลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับในผู้ที่มีความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับและผู้ป่วยที่เกิดแผลกดทับแล้ว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ตัวเครื่องปั๊ม

1. ปุ่มเปิด-ปิด เครื่องปั๊มลม
2. แผงด้านหน้า / ปุ่มปรับระดับความดัน
3. ท่อส่งลม
4. สายไฟ
5. ตะขอแขวน


วิธีการใช้

1. ที่นอน

- 1.1 วางที่นอนไว้ด้านบนของเตียงนอน โดยวางส่วนปลายของที่นอน (มีท่อลม) ไว้ด้านบนเตียง สอดชายผ้าด้านข้างทั้งสองเข้าใต้เตียงเพื่อป้องกันการลื่นไหล

2. ปั๊มลม

- 2.1 วางปั๊มลมไว้บนพื้นราบหรือใช้ตะขอเกี่ยวแขวนไว้ที่ปลายเตียง
- 2.2 กรณีแขวนปั๊มไว้ที่ปลายเตียง (ด้านเท้า) ให้จัดความกว้างของตะขอเกี่ยวให้เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของปั๊ม
- 2.3 นำสายท่ออากาศของที่นอนเสียบกับช่อง (ภาพที่ 1)
- 2.4 ตรวจสอบว่าท่ออากาศไม่ ขด/พับ หรือ ถูกรัดไว้ใต้ที่นอน พร้อมทั้งตรวจสอบ สวิตช์ เปิด/ปิด (ภาพที่ 2) ให้อยู่ที่ ตำแหน่ง ปิด "OFF"
- 2.5 เสียบสายไฟเข้ากับไฟฟ้าบ้านกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.6 กดสวิตช์ไปตำแหน่ง เปิด "ON" (ภาพที่ 2)
ระบบจะเริ่มทำงาน ปั๊มจะเริ่มทำงานโดยจะค่อยๆ ปลอ่ยลมเข้าสู่แผ่นที่นอน
- 2.7 เมื่อปั๊มลมทำงานประมาณ 30 นาที ที่นอนจะมีลักษณะพอง ซึ่งพร้อมที่จะใช้งาน
- 2.8 ระหว่างใช้งานจะต้องเปิดปั๊มลมตลอดเวลา ปั๊มลมสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
- 2.9 ผู้ใช้สามารถปรับความนุ่มหรือความแข็งของที่นอนได้ตามความต้องการ โดยหมุนปุ่มปรับความดัน (ภาพที่ 3) ที่อยู่ด้านหน้าปั๊มได้ตั้งแต่ 40-100 Kg
- 2.10 เมื่อจะเลิกใช้งาน ให้กดสวิตช์ (ภาพที่ 2) ไปที่ตำแหน่ง ปิด "OFF" ปั๊มจะหยุดทำงานและให้ถอดปลั๊กออกจากไฟฟ้าบ้าน

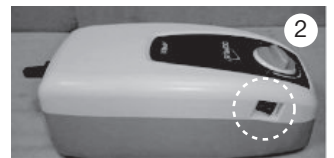

คำเตือนและข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผิวไหม้ ไฟช็อต ไฟไหม้หรือบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามดังนี้
1. ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับเด็กหรือใช้งานอยู่ใกล้เด็ก
 2. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่อธิบายในคู่มือ ห้ามใช้ส่วนควบอื่นที่ไม่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต
 3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ถ้าสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย เครื่องไม่ทำงาน ตกหล่นจนเสียหายหรือตกรั่ว ควรนำผลิตภัณฑ์ที่เสียหายนี้ส่งไปตรวจสอบหรือซ่อมที่ศูนย์บริการ
 4. เก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีความร้อน
 5. ห้ามปิดกั้นช่องปล่อยลมหรือผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น เบาะนอนหรือเบาะ อาจทำให้ช่องลมถูกปิดกั้น ควรป้องกันไม่ให้มีขนสัตว์ เส้นผมหรือเศษผง เข้าไปในช่องลม
 6. ห้ามสอดหรือใส่สิ่งใด ๆ ลงในช่องปล่อยลมหรือท่อลม
 7. ห้ามแยกส่วนหรือดัดแปลงโดยเด็ดขาด



เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรปฏิบัติตามนี้

1. ควรถอดปลั๊กออกทันทีหลังจากเลิกใช้งาน
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขณะอาบน้ำ
3. อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้ถังน้ำหรืออ่างน้ำ
4. ห้ามวางหรือทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในน้ำหรือของเหลว
5. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ตกรั่ว "ให้ดึงปลั๊กออกทันที"

วิธีการเก็บรักษา

1. ม้วนเก็บเมื่อไม่ใช้งาน โดยเริ่มม้วนจากส่วนหัวไปจนถึงส่วนปลายเท้า
2. เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดด

การทำความสะอาด

ควรทำความสะอาดตามวิธีข้างล่างนี้ ก่อนนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ มิฉะนั้นผู้ป่วยและ/หรือแพทย์อาจติดเชื้อโรคได้

1. เช็ดบิ่ด้วยผ้าเปียกหมาด ๆ กับน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนและควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ควรเลือกน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีสารเคมีที่มีผลต่ออุปกรณ์พลาสติกของเครื่องบิ่
2. เช็ดที่นอนด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน ผ้าคลุมทำความสะอาดได้ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เจือจางกับน้ำ อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนควรเป่าให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน



ข้อควรระวัง

- ห้ามแช่หรือจุ่มเครื่องบิ่ลงน้ำ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย "ฟีนอลิก" ในการทำความสะอาด
- ควรตากที่นอนในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดดหลังทำความสะอาดแล้ว

คำเตือน

1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
2. อาจทำให้เกิดอาการช็อค / หหมดสติจากการทำงานผิดปกติของเครื่องหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า
3. ใช้แทนการออกกำลังกายไม่ได้
4. หากเกิดอาการบาดเจ็บหรือเกิดความผิดปกติในระหว่างการใช้งาน ให้หยุดใช้งานและปรึกษาแพทย์ทันที

ข้อห้ามใช้

1. ผู้ป่วยที่มีการดึงกระดูก (cervical หรือ skeletal traction)
2. ผู้ป่วยที่บาดเจ็บเกี่ยวกับไขสันหลัง (unstable spinal cord injuries)
3. บริเวณที่มีแผลบาดเจ็บหรือแผลเปิด
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขณะอาบน้ำ

ผู้ผลิต เอเพ็กซ์ เมดิคอล(คุนซาน) คอร์ป

เลขที่ 1368 ถนนซีลือ คุนซาน โค ฟา ไฮ-เทค เมืองคุนซาน เจียงซูเซี่ยน ประเทศจีน

ผู้นำเข้า บริษัท เอเพ็กซ์เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด

65/100 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-018-2140 ต่อ 4210 โทรสาร 02-018-2101

วิธีการลงทะเบียนรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ได้ลงทะเบียนการรับประกันจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว นับจากวันที่ผลิตตามระยะเวลาที่ระบุหน้ากล่อง หากท่านต้องการปรับเวลารับประกันเป็นนับจากวันที่ท่านซื้อ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.samh.co.th/warranty โดยบันทึกหมายเลขบนสติ๊กเกอร์ **Samh** ที่ติดบนตัวเครื่องแล้วกด "ตกลง"

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมเครื่องที่ผ่านการซ่อมแซมจากที่อื่นหรือถูกดัดแปลงไปจากมาตรฐานเดิมของโรงงานรวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ รวมถึงลงทะเบียนรับประกันสินค้าหลังจากเข้าสู่ระบบได้ แต่หากท่านไม่ประสงค์สมัครสมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการรับประกันสินค้าได้เลยที่นี่

ลงทะเบียนรับประกัน

กรุณาใส่เลขสติ๊กเกอร์ Samh

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ลงทะเบียนสินค้า

ชื่อผู้ลงทะเบียนสินค้า

ตกลง

ลงทะเบียนไม่สำเร็จใช่ไหม? ค้นหาตำแหน่งหมายเลขสติ๊กเกอร์ Samh