



# คู่มือการใช้งาน ก๊อนลม เอพีคซ์ รุ่น โดมุส 2 (APEX Model Domus 2)



บริษัท เอพีคซ์เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด  
65/100 อาคารชานาณพิณชาติบิซเนสเซ็นเตอร์ ชั้น11  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 02-018-2140  
www.amt.in.th



เพื่อความปลอดภัย ควรศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

## ประโยชน์

1. ช่วยลดแรงกดทับและกระจายแรงกดทับไปทั่วร่างกาย
2. ลดแรงเสียดสีระหว่างที่นอนและผิวของผู้ป่วย อันจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและผู้ป่วยที่เกิดแผลกดทับแล้ว

## คำเตือน

1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
2. อาจทำให้เกิดอาการช็อค / หมดสติจากการทำงานผิดปกติของเครื่องหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า
3. ใช้แทนการออกกำลังกายไม่ได้
4. หากเกิดอาการบาดเจ็บหรือเกิดความผิดปกติในระหว่างการใช้งาน ให้หยุดใช้งาน และปรึกษาแพทย์ทันที

## ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. บริเวณที่มีความผิดปกติของผิวหนัง เช่น ผื่นแดง มีอาการอักเสบหรือติดเชื้อ เป็นต้น
3. บริเวณที่เป็นปุ่มกระดูก
4. ภาวะกระดูกพรุน
5. บริเวณด้านหน้าลำคอ

## ข้อห้ามใช้

1. ผู้ป่วยที่มีการดึงกระดูก (cervical หรือ skeletal traction)
2. ผู้ป่วยที่บาดเจ็บเกี่ยวกับไขสันหลัง (unstable spinal cord injuries)
3. บริเวณที่มีแผลบาดเจ็บหรือแผลเปิด
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขณะอาบน้ำ


## วิธีการใช้

### 1. ที่นอน รุ่น 4" Mattress

- 1.1 วางที่นอนไว้ด้านบนของเตียงนอน โดยวางส่วนปลายของที่นอนไว้ด้านปลายของเตียงนอนและให้ชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างสอดไว้ข้างใต้ของที่นอน
- 1.2 ควรปูผ้าคลุมทับบนที่นอนเพื่อเพิ่มความสบายตัวให้ผู้ป่วย

### 2. ปั๊มลม รุ่น 9P-047580 (Pump Model)

- 2.1 วางปั๊มลมไว้บนพื้นราบหรือใช้ตะขอเกี่ยวซึ่งอยู่ด้านหลังปั๊มลมแขวนไว้ที่ปลายเตียง
- 2.2 กรณีแขวนปั๊มไว้ที่ปลายเตียง (ด้านเท้า) ให้จัดปรับความกว้างของตะขอเกี่ยวให้เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของปั๊ม
- 2.3 นำสายท่ออากาศของที่นอนเสียบกับช่อง (ภาพที่ 1)
- 2.4 ตรวจสอบว่าท่ออากาศไม่ ชด/พับ หรือ ถูกรัดไว้ใต้ที่นอน พร้อมทั้งตรวจสอบ สวิตช์ เปิด/ปิด (ภาพที่ 2) ให้อยู่ที่ ตำแหน่ง ปิด "OFF"
- 2.5 เสียบสายไฟเข้ากับไฟฟ้าบ้านกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.6 กดสวิตช์ไปตำแหน่ง เปิด "ON" (ภาพที่ 2)

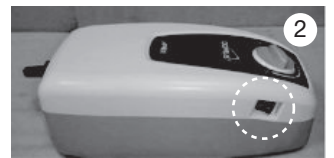

- ระบบจะเริ่มทำงาน ปั๊มจะเริ่มทำงานโดยจะค่อย ๆ ปล่อยลมเข้าสู่แผ่นที่นอน
- 2.7 เมื่อปั๊มลมทำงานประมาณ 30 นาที ที่นอนจะมีลักษณะพอง ซึ่งพร้อมที่จะใช้งาน
- 2.8 ระหว่างใช้งานจะต้องเปิดปั๊มลมตลอดเวลา ปั๊มจะสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
- 2.9 ผู้ใช้สามารถปรับความนุ่มหรือความแข็งของที่นอนได้ตามความต้องการ โดยหมุนปุ่มปรับความดัน (ภาพที่ 3) ที่อยู่ด้านหลังปั๊มได้ตั้งแต่ 40-100 Kg
- 2.10 เมื่อจะเลิกใช้งาน ให้กดสวิตช์ (ภาพที่ 2) ไปที่ตำแหน่ง ปิด "OFF" ปั๊มจะหยุดทำงานและให้ถอดปลั๊กออกจากไฟฟ้าบ้าน



## คำเตือนและข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผิวไหม้ ไฟช็อต ไฟไหม้หรือบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามดังนี้
1. ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับเด็กหรือใช้งานอยู่ใกล้เด็ก
  2. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่อธิบายในคู่มือ ห้ามใช้ส่วนควบอื่นที่ไม่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต
  3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ถ้าสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย เครื่องไม่ทำงาน ตกหล่นจนเสียหายหรือตกรั่ว ควรนำผลิตภัณฑ์ที่เสียหายนี้ส่งไปตรวจสอบหรือซ่อมที่ศูนย์บริการ
  4. เก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีความร้อน
  5. ห้ามปิดกั้นช่องปล่อยลมหรือผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น เบาะนอนหรือเบาะ อาจทำให้ช่องลมถูกปิดกั้น ควรป้องกันไม่ให้มีขนสัตว์ เส้นผมหรือเศษผง เข้าไปในช่องลม
  6. ห้ามสอดหรือใส่สิ่งใด ๆ ลงในช่องปล่อยลมหรือท่อลม
  7. ห้ามแยกส่วนหรือดัดแปลงโดยเด็ดขาด



### เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรปฏิบัติตามดังนี้

1. ควรถอดปลั๊กออกทันทีหลังจากเลิกใช้งาน
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขณะอาบน้ำ
3. อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้ถังน้ำหรืออ่างน้ำ
4. ห้ามวางหรือทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในน้ำหรือของเหลว
5. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ตกรั่ว "ให้ดึงปลั๊กออกทันที"

## การทำความสะอาด

ควรทำความสะอาดตามวิธีข้างล่างนี้ ก่อนนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ มิฉะนั้นผู้ป่วยและ/หรือแพทย์อาจติดเชื้อโรคได้

1. เช็ดบีมด้วยผ้าเปียกหมาด ๆ กับน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนและควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ควรเลือกน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีสารเคมีที่มีผลต่ออุปกรณ์พลาสติกของเครื่องบีม
2. เช็ดที่นอนด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน ผ้าคลุมทำความสะอาดได้ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เจือจางกับน้ำ อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนควรเป่าให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน



### ข้อควรระวัง

- ห้ามแช่หรือจุ่มเครื่องบีมลงน้ำ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย "ฟีนอลิก" ในการทำความสะอาด
- ควรตากที่นอนในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดดหลังทำความสะอาดแล้ว

## วิธีการเก็บรักษา

1. ที่นอน รุ่น 4" Mattress
  - 1.1 ม้วนเก็บเมื่อไม่ใช้งาน โดยเริ่มม้วนจากส่วนหัวไปจนถึงส่วนปลายเท้าและบรรจุในถุงที่สะอาด
  - 1.2 ห้ามพับหรือทำให้ที่นอนมีรอยย่น
  - 1.3 เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดด
2. ปั๊มลม รุ่น 9P-047580 (Pump Model)
  - 2.1 เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดด
  - 2.2 เก็บเครื่องโดยวางบนพื้นเรียบ

ผู้ผลิต เอเพ็กซ์ เมดิคอล(คุนซาน) คอร์ป

เลขที่ 1368 ถนนซีลือ คุนซาน โค ฟา ไฮ-เทค เมืองคุนซาน เจียงซูเซี่ยน ประเทศจีน

ผู้นำเข้า บริษัท เอเพ็กซ์เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด

65/100 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-018-2140 ต่อ 4210 โทรสาร 02-018-2101

## วิธีการลงทะเบียนรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ได้ลงทะเบียนการรับประกันจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว นับจากวันที่ผลิตตามระยะเวลาที่ระบุหน้ากล่อง หากท่านต้องการปรับเวลารับประกันเป็นนับจากวันที่ท่านซื้อ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ [www.samh.co.th/warranty](http://www.samh.co.th/warranty) โดยบันทึกหมายเลขบนสติ๊กเกอร์ **Samh** ที่ติดบนตัวเครื่องแล้วกด "ตกลง"

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมเครื่องที่ผ่านการซ่อมแซมจากที่อื่นหรือถูกดัดแปลงไปจากมาตรฐานเดิมของโรงงานรวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงลงทะเบียนรับประกันสินค้าหลังจากเข้าสู่ระบบได้ แต่หากท่านไม่ประสงค์สมัครสมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการรับประกันสินค้าได้เลยที่นี่

### ลงทะเบียนรับประกัน

กรุณาใส่เลขสติ๊กเกอร์ SamH

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ลงทะเบียนสินค้า

ชื่อผู้ลงทะเบียนสินค้า

ตกลง

ลงทะเบียนสำหรับรุ่นนี้?    ค้นหาแผนผังหมายเลขสติ๊กเกอร์ SamH